


Benodigheden

1. Nieuwe nekband
2. Spiegel
3. Schaar



Maak het klittenband van het korte gedeelte van de *nieuwe* nekband los van het lange gedeelte zodat er twee losse delen ontstaan.

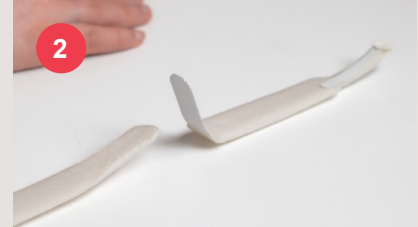

Leg de twee delen van de *nieuwe* nekband voor u neer en maak bij beide de kleine klittenband-sluitingen los.



Houd met één hand de halsplaat op zijn plek terwijl u met uw andere hand het korte deel van de *oude* nekband verwijdert.



Pak het korte deel van de *nieuwe* nekband en rijg met het klittenband naar buiten (zachte kant tegen de hals) door het oog van de halsplaat. Bevestig het klittenband op de nekband.



Houd met één hand de halsplaat op zijn plek terwijl u met uw andere hand het lange deel van de *oude* nekband verwijdert.




Pak het lange gedeelte van de *nieuwe* nekband en rijg met het klittenband naar buiten (zachte kant tegen de hals) door het oog van de halsplaat. Bevestig het klittenband op de nekband.



Maak de twee delen van de *nieuwe* nekband weer aan elkaar vast door het klittenband van het korte deel aan het lange deel te bevestigen.



Controleer of de nekband niet te strak zit. Er moeten twee vingers tussen uw hals en de nekband passen.

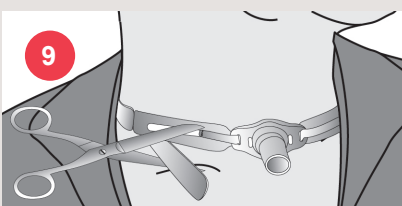

Knip overtollig materiaal af indien nodig. Zorg ervoor dat er voldoende overblijft om het weer los te kunnen maken. Gooi de oude nekband weg.



Bekijk hier de instructievideo

Atos

Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

TIP #1

Het verwisselen van de nekband kan gemakkelijker zijn met de hulp van een ander, totdat u gewend bent aan de procedure. U kunt zelf de halsplaat op zijn plek houden terwijl de ander u -volgens de gebruiksaanwijzing- helpt de oude nekband te verwijderen en een nieuwe aan te brengen, of andersom.

TIP #2

Na het verwijderen van de oude nekband is het belangrijk om de huid onder de nekband te inspecteren. Er kan beschadiging van de huid optreden wanneer de nekband te strak wordt gedragen. Controleer de huid op tekenen van beschadiging, irritatie of ontsteking alvorens u een nieuwe nekband aanbrengt.

TIP #3

Vervang de nekband iedere 24 uur of vaker indien nodig.

Producent:

Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1/3
55268 Nieder-Olm, Duitsland

Atos Medical Benelux
Werner von Siemensstraat 11
1712 PN Zoetermeer
Nederland

Atos Medical BV
Tel. +31 (0)79 593 50 00
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

Atos Medical BVBA
Tel. +32 (0)2 218 55 50
info.be@atosmedical.com
www.atosmedical.be

©Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. Atos en het Atos Medical logo zijn handelsmerken van Coloplast A/S.

Disclaimer: De in dit document verstrekte informatie is geen vervanging van de officiële gebruikershandleidingen van de getoonde producten. Raadpleeg altijd uw arts, clinicus of bevoegd zorgverlener voor advies met betrekking tot uw persoonlijke situatie en het gebruik van deze producten.

MC3018 BNL 2023