

Benodigheden

1. Kom
2. Provox Swabs
3. Gaaskompressen

Binnencanules moeten dagelijks worden gereinigd en indien nodig vaker om slijm te verwijderen, ophoping van slijm te voorkomen en om de canule schoon te houden.



Zet een kom met drinkwater klaar of indien nodig met steriel of gedestilleerd water.



Spoel uw gebruikte binnencanule af in de kom met water. Dit kan ook onder de kraan.



Reinig de binnencanule via beide uiteinden met een swab. Gebruik zoveel swabs als u nodig acht voor het reinigen.



Gebruik een swab om de buitenkant van de binnencanule schoon te maken.



Spoel de binnencanule af in een kom met schoon water of onder lauw kraanwater.



Laat aan de lucht drogen en berg de binnencanule op in een schoon, droog en afsluitbaar bakje voor volgend gebruik.

Gooi de swab na gebruik weg.

LET OP:

De binnencanule mag uitsluitend worden gereinigd ná verwijdering uit de buitencanule en nooit als de binnencanule zich nog in de buitencanule bevindt.



Bekijk hier de instructievideo

Producent:

Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1/3
55268 Nieder-Olm, Germany

Atos Medical Benelux
Werner von Siemensstraat 11
1712 PN Zoetermeer
Nederland

Atos Medical BV
Tel. +31 (0)79 593 50 00
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

Atos Medical BVBA
Tel. +32 (0)2 218 55 50
info.be@atosmedical.com
www.atosmedical.be

©Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. Atos en het Atos Medical logo zijn handelsmerken van Coloplast A/S.

Disclaimer: De in dit document verstrekte informatie is geen vervanging van de officiële gebruikershandleidingen van de getoonde producten. Raadpleeg altijd uw arts, clinicus of bevoegd zorgverlener voor advies met betrekking tot uw persoonlijke situatie en het gebruik van deze producten.

MC3020 BNL 2023